

STOCK CODE 603387

# Einstufiger Test für SARS-CoV-2-Antigen

(kolloidales Gold)

- Zum Selbsttest


Ein schnelle, bequeme, einfache und zuverlässige Methode zum Nachweis von COVID-19



## Verwendungszweck

Einstufiger Test für SARS-CoV-2-Antigen (Kolloidales Gold) ist zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen in menschlichen Nasentupferproben vorgesehen.

Dieser Test eignet sich für medizinische Laien als Selbsttest zu Hause oder bei der Arbeit.

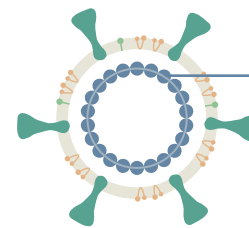

Nucleocapsid-Protein

## Produktkomponenten



SARS-CoV-2-Antigen  
-Testkarte



Probenextraktionslösung



Einwegpipette



Biohazard-Probenbeutel




Einweg-Probentupfer



Benutzerhandbuch

# COVID-19-Diagnostetests

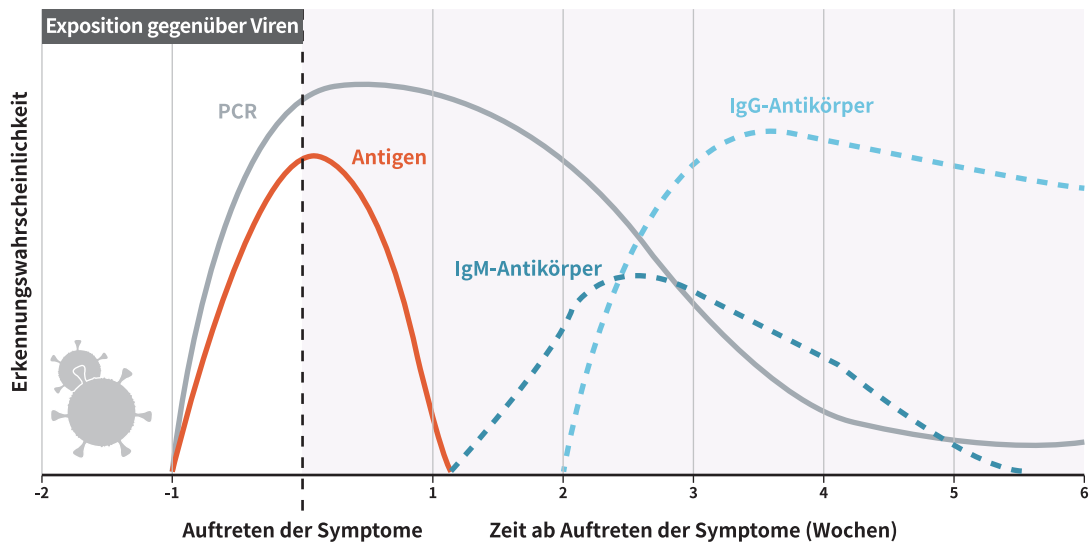


- **PCR-basierte Tests** können kleine Mengen an viralem genetischem Material nachweisen.
- **Antigen-Tests** können das Vorhandensein von viralen Proteinen nachweisen und positive Ergebnisse liefern, wenn eine Person am infektiösesten ist.
- - - **Antikörpertests** können die körpereigene Immunantwort auf das Virus nachweisen.

## Eigenschaften


- Nicht-invasive Probenahme (Probentyp: Nasentupfer)
- Schnelltest. Testergebnis in 10-15 min verfügbar.
- Testergebnisse visuell lesen. Benötigen Sie keine Testausrüstung.
- Einfache Bedienung, leicht zu erlernen und zu bedienen
- Früherkennung einer SARS-CoV-2-Infektion
- Lagerung bei Raumtemperatur (4-30 °C)

## Betrieb

### Nasentupfer- -Probenahme

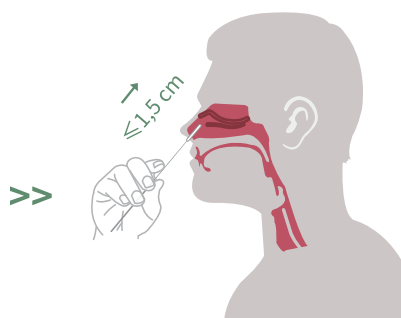


Führen Sie die Spitze des Tupfers in ein Nasenloch ein.

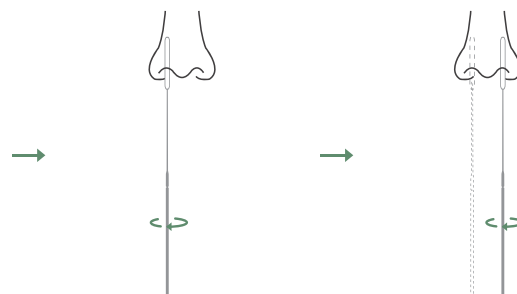


≥ 4 mal drehen (insgesamt 15 s)

Wiederholen Sie mit dem gleichen Tupfer.


## Probenvorbehandlung >>

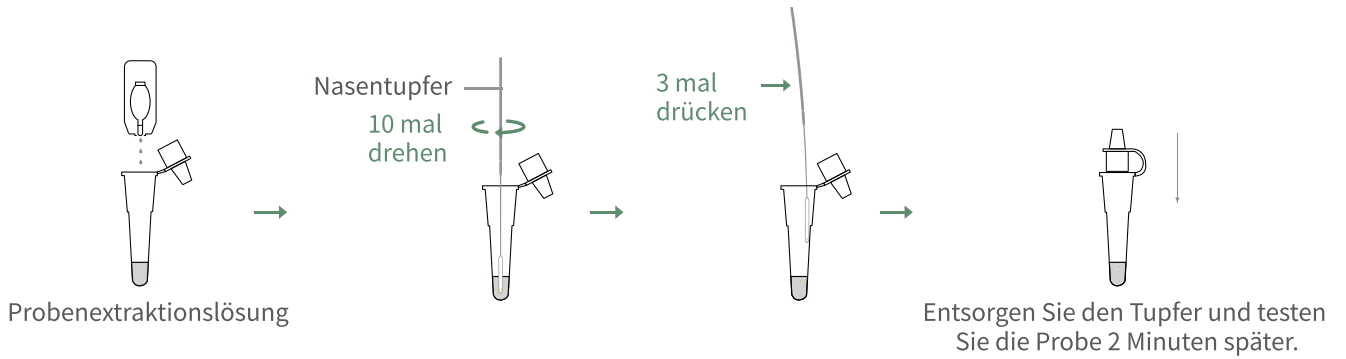


## Test >>

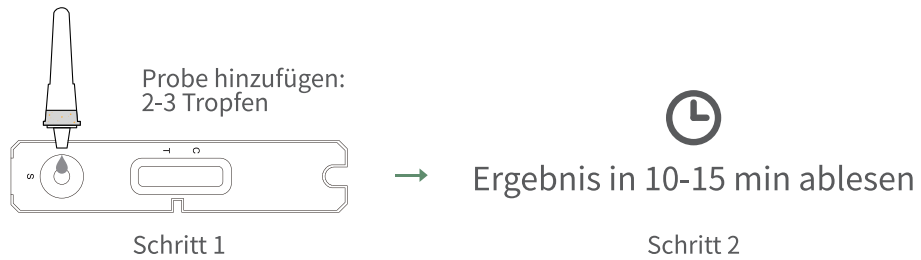

## Testergebnisse

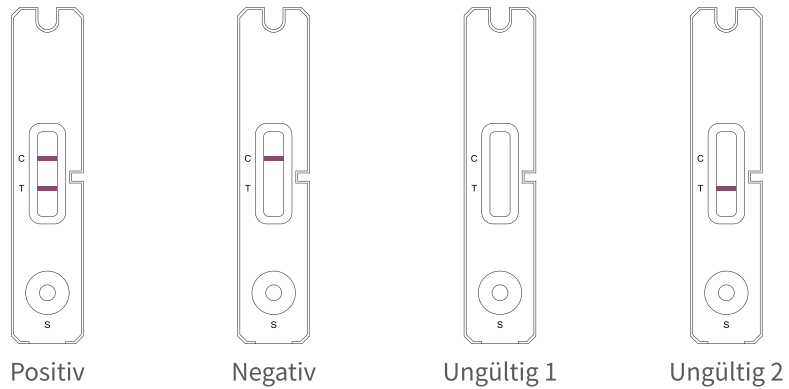

Scannen Sie den QR-Code,  
um ein Betriebsvideo zu erhalten

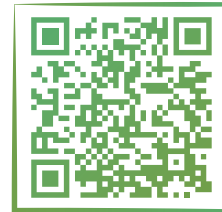

### Getein Biotech, Inc.

Add: No.9 Bofu Road, Luhe District, Nanjing, 211505, China

Tel: +86-25-68568508/68568594

Fax: +86-25-68568500

E-mail: sales@getein.com.cn; overseas@getein.com.cn

Web: en.bio-gp.com.cn



### CMC Medical Devices & Drugs S.L.

Add: C/ Horacio Lengo N° 18, CP 29006, Málaga, Spain

